


TRANSGLIDE "PULL SHEET" Alaise de transfert pour patient

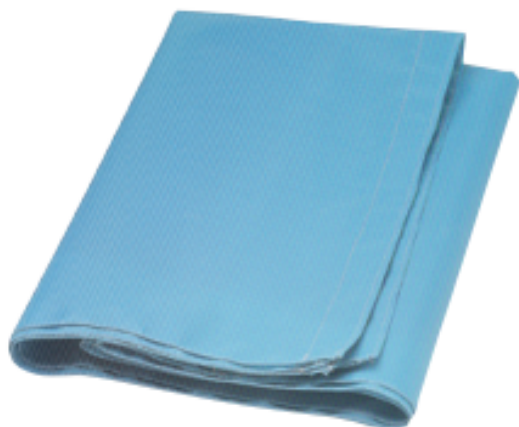

Description du produit :

Comment utiliser ?

- 1) Tournez le patient sur le côté à l'aide de l'alaise, pousser le Transglide sous l'alaise et remettre le patient sur le Transglide. Tenez l'alaise avec les deux mains et le dos droit.
- 2) À l'aide de l'alaise, faire glisser le patient sur le Transglide en gardant le dos droit. Une deuxième personne aidera en poussant doucement.
- 3) Une fois que le patient a été placé dans une position correcte sur le lit/le divan/la table de radiologie/etc. Le deuxième assistant tire le Transglide par le bas, en l'étirant légèrement, ce qui permet de l'enlever sous le patient.

Caractéristiques :

- Facile à utiliser par un ou deux soignants
- Facile à nettoyer et résistant aux acides
- Translucide aux rayons X
- Très bon rapport qualité-prix
- Taille : 150 x 150 cm

Référence : -