

EASYVIEW HE - PROTÈGE SERINGUE

Gamme complète de protège-seringues blindés en tungstène haute énergie


Description du produit :

Les protège-seringues Easyview se déclinent dans une **gamme étendue et complète** en dimensions et en blindage (de 2 à 7 mm de tungstène) afin de proposer aux utilisateurs une **solution ergonomique et protectrice** indispensable lors des préparations, transferts et injections de doses de **radiopharmaceutiques toutes énergies** pour les activités **SPECT et PET**. Quel que soit le radioélément considéré : 99mTc, 111In, 123I, 177Lu, 201Tl, 131I, 18F, 68Ga et la méthode d'administration requise : injection patient en direct ou par raccordement à un cathéter ou un robinet 3 voies, **la bonne prise en main** de ce protège-seringue favorise **la dextérité, la précision et la rapidité d'exécution du geste** de l'utilisateur, limitant ainsi son contact avec l'élément radioactif au temps minimum. Cette gamme de protège-seringues ergonomiques répond aux plus hauts standards réglementaires et est conforme à la vente pour le marché américain.

Le **protège-seringue Easyview** est constitué en **partie principale** d'un fourreau en **tungstène** (de 2 à 7 mm selon le modèle) avec un **usinage très fin** pour obtenir un rendu **parfaitement lisse** au touché, ce qui **facilite la préhension**, mais aussi le **nettoyage et la décontamination par immersion** ou avec des lingettes adaptées.

L'atténuation des rayonnements gamma de 140 KeV du 99mTc est de plus de 99.7% pour une activité de 740 MBq et **86.95% d'atténuation** pour une activité de 300 MBq de 68Ga.

Sa **large fenêtre de vision blindée en verre au plomb de haute densité 5.2** avec **effet loupe** permet une **bonne visualisation du volume** détenu dans la seringue et de ses **graduations en totalité**, pour **faciliter les prélèvements de précision** et améliorer ainsi le **confort de travail** au quotidien. Si besoin, la fenêtre de vision blindée en verre au plomb peut être remplacée par une pièce en tungstène (option kit de rechange "tout tungstène").

Une **gravure d'identification** indiquant le **modèle et l'énergie** (BME ou HE) sur le corps en tungstène de

l'Easyview permet de **faciliter le choix du protège-seringue** à utiliser en concordance avec la contenance de la seringue et le radioélément utilisé. Cette gravure facilite également les inventaires et les commandes d'accessoires.

Un verrou en plastique noir (PA 6.6) **garantit le maintien de la seringue** dans le protège-seringue et **sécurise sa position** en empêchant tout mouvement aléatoire indésirable.

La conception ingénieuse de l'Easyview permet à l'utilisateur grâce au démontage d'une seule vis de procéder **en toute autonomie au changement de la fenêtre de vision blindée** en verre au plomb (ou la pièce en tungstène avec le kit de rechange "tout tungstène"), en cas de nécessité, soit pour un simple remplacement, ou en cas de nettoyage et décontamination poussés, mais également lors du changement du verrou de la seringue en plastique avec **l'outil fourni** (clé Torx).

Référence	Description
00024946	EASYVIEW HE syringe shield - 1mL/70mm
00024947	EASYVIEW HE syringe shield - 1mL/76mm
00024953	EASYVIEW HE syringe shield - 1mL+/75mm (larger diameter)
00024948	EASYVIEW HE syringe shield - 2mL/50mm
00024949	EASYVIEW HE syringe shield - 2mL/53mm
00024950	EASYVIEW HE syringe shield - 2,5mL/59mm
00024952	EASYVIEW HE syringe shield - 3mL/69mm
00024954	EASYVIEW HE syringe shield - 5mL/57mm
00024951	EASYVIEW HE syringe shield - 5mL/61mm
00024955	EASYVIEW HE syringe shield - 5mL/64mm
00024956	EASYVIEW HE syringe shield - 10mL/73mm
00024957	EASYVIEW HE syringe shield - 10mL/75mm
00024958	EASYVIEW HE syringe shield - 10mL/83mm
00028075	EASYVIEW HE syringe shield - 10mL/85mm

Easyview - contenance: 1 mL, 2 mL, 2,5 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL

Easyview - Longueur: 70 mm, 75 mm, 76 mm, 50 mm, 53 mm, 59 mm, 69 mm, 57 mm, 61 mm, 64 mm, 73 mm, 83 mm, 85 mm

Référence : LEMXXXXX