

NUCLEAN - LINGETTES DE DÉSINFECTION DE SURFACE
Lingettes imprégnées pour la désinfection des surfaces en environnement médical



Description du produit :

NUCLEAN est une solution de **désinfection des surfaces** destinée à l'environnement médical, clinique et hospitalier. Les **lingettes imprégnées NUCLEAN** sont adaptées au nettoyage et à la désinfection des surfaces de dispositifs médicaux **non immergeables**, sans nécessité de rinçage (hors surfaces en contact alimentaire).

Prêtes à l'emploi, les lingettes NUCLEAN associent une **action nettoyante et désinfectante** avec un séchage rapide, sans laisser de traces. Leur formulation est **hypoallergénique** et conçue pour un usage régulier en milieu de soins.

Caractéristiques principales

- Lingettes imprégnées prêtes à l'emploi
- Adaptées aux surfaces de dispositifs médicaux non immergeables
- Sans rinçage (sauf surfaces en contact alimentaire)
- Séchage rapide, sans traces
- Formulation hypoallergénique
- Activité désinfectante complète en 5 minutes

Conditionnement

- Boîte distributrice de **120 lingettes imprégnées**
- Dimensions des lingettes : **190 x 130 mm**

Propriétés microbiologiques - Lingettes NUCLEAN

Bactéries

- EN 13727 : actif en 1 minute
- EN 1276 : actif en 5 minutes
- EN 13697 : actif en 5 minutes

- EN 14561 : actif en 5 minutes
- EN 16615 : actif en 5 minutes

Levures / Moisissures

- EN 13624 : actif en 1 minute
- EN 1650 : actif en 5 minutes
- EN 13697 : actif en 5 minutes
- EN 14562 : actif en 5 minutes
- EN 16615 : actif en 5 minutes

Virus

- EN 14476 : actif en 30 secondes à 5 minutes selon les souches

Spores

- EN 13704 : Clostridium difficile – actif en 15 minutes

Mode d'utilisation - Lingettes NUCLEAN

- 1Sortir une lingette de la boîte.
- 2Nettoyer minutieusement la surface.
- 3Laisser agir le produit **5 minutes** (15 minutes pour *Clostridium difficile*).
- 4Ne pas rincer (sauf surfaces en contact alimentaire).
- 5Utiliser une lingette par équipement.
- 6Bien refermer la boîte après chaque utilisation.

Référence : AL4004