

## NUCLEAN - SPRAY DE DÉSINFECTION DE SURFACE

Spray prêt à l'emploi pour la désinfection des surfaces en environnement médical



### Description du produit :

**NUCLEAN** est un **spray de désinfection des surfaces** destiné aux environnements médicaux, cliniques et hospitaliers. Il est formulé pour le **nettoyage et la désinfection des surfaces de dispositifs médicaux non immergeables**, sans rinçage (sauf surfaces en contact avec les denrées alimentaires).

Prêt à l'emploi, le spray NUCLEAN associe une **action nettoyante et désinfectante** avec un séchage rapide, sans laisser de traces. Sa formulation **hypoallergénique** est adaptée à une utilisation régulière en milieu de soins.

### Caractéristiques principales

- Spray prêt à l'emploi
- Adapté aux surfaces de dispositifs médicaux non immergeables
- Sans rinçage (hors surfaces en contact alimentaire)
- Séchage rapide, sans résidu
- Formulation hypoallergénique
- Activité désinfectante complète en 5 minutes

### Conditionnement

- Flacon pulvérisateur de **500 ml**
- Compatible avec des supports d'essuyage non tissés (type carrés bionet 40 × 38 cm, réf. 712)

### Propriétés microbiologiques - Spray NUCLEAN

#### Bactéries

- EN 13727 : actif en 1 minute
- EN 1276 : actif en 5 minutes
- EN 13697 : actif en 5 minutes
- EN 14561 : actif en 5 minutes

**Levures / Moisissures**

- EN 13624 : actif en 1 minute
- EN 1650 : actif en 5 minutes
- EN 13697 : actif en 5 minutes
- EN 14562 : actif en 5 minutes

**Virus**

- EN 14476 : Novovirus, HIV-1 – actif en 30 secondes
- EN 14476 : Hépatite B, Herpès virus, Influenza A/H1N1 – actif en 1 minute
- EN 14476 : Hépatite C, Rotavirus, Adenovirus – actif en 5 minutes

**Spores**

- EN 13704 : *Clostridium difficile* – actif en 15 minutes
- NF T 72-281 : *Bacillus subtilis* – actif en 5 minutes

**Indications d'emploi - Spray NUCLEAN**

- 1Pré-imprégner un support non tissé propre avec la solution.
- 2Nettoyer minutieusement la surface à désinfecter.
- 3Laisser agir le produit **5 minutes** (15 minutes pour *Clostridium difficile*).
- 4Ne pas rincer, sauf pour les surfaces en contact avec des denrées alimentaires.
- 5Utiliser un support non tissé propre pour chaque équipement.

Référence : EC500