

ECHO CLEAN - SPRAY DÉSINFECTANT NIVEAU 2 Spray pour la désinfection intermédiaire des sondes d'échographie



Description du produit :

ECHO CLEAN spray est une solution prête à l'emploi destinée au **nettoyage** et à la **désinfection de niveau intermédiaire** des **sondes d'échographie**. Il est adapté à une utilisation sur les sondes endocavitaires, conformément aux protocoles de la **SF2H**, en utilisant un support d'essuyage non tissé pour chaque étape (nettoyage et désinfection).

Testé et approuvé par les fabricants d'échographes, ECHO CLEAN bénéficie d'une **formule non corrosive** compatible avec les équipements médicaux sensibles régulièrement exposés aux produits désinfectants.

- **Activité totale en 5 minutes**
- Formule spécifiquement développée pour les sondes d'échographie
- Sans aldéhyde ni colorant
- Séchage rapide
- Ne laisse pas de traces
- Prêt à l'emploi
- **Flacon pulvérisateur de 1 litre**

Certification fabricants

ECHO CLEAN est certifié pour la désinfection des sondes d'échographie par les fabricants suivants :

- GE
- Fujifilm Sonosite
- Siemens Healthineers

Indications d'emploi

- 1Pré-impregner un support non tissé propre avec la solution.
- 2Nettoyer minutieusement la surface de la sonde.
- 3Laisser agir le produit **5 minutes (15 minutes pour *Clostridium difficile*)**.

4Ne pas rincer (sauf pour les surfaces en contact alimentaire).
5Changer de support non tissé pour chaque équipement.

Niveau de désinfection: Niveau 2 (intermédiaire)

Référence : -