

**SEPTISPRAY 2 - SPRAY DE DÉSINFECTION NIVEAU 1**  
**Désinfection de bas niveau des dispositifs médicaux - solution sans alcool**



### Description du produit :

**SEPTISPRAY 2** est une **solution détergente désinfectante sans alcool**, destinée au **nettoyage et à la désinfection de bas niveau** des surfaces de dispositifs médicaux réutilisables, invasifs et non invasifs.

Formulé pour préserver les matériaux sensibles, SEPTISPRAY 2 convient aux **protocoles de désinfection par essuyage** en cabinet médical, service d'imagerie et milieu clinique. Son action microbiologique est conforme aux normes en vigueur, tout en offrant une excellente compatibilité avec les équipements médicaux.

### Caractéristiques principales

- Détergent désinfectant **sans alcool**
- Désinfection de bas niveau par essuyage
- Adapté aux dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non invasifs (classe IIa)
- Large compatibilité matériaux grâce à une faible tension de surface
- Liquide incolore, **sans parfum**
- pH neutre à légèrement alcalin : **6,5 - 7,5**
- Prêt à l'emploi

### Propriétés microbiologiques (conditions de saleté, 20 °C)

#### Bactéries

- EN 1276 / EN 13727 / EN 16615 : actif en **2 minutes**

#### Levures

- EN 1650 / EN 13624 / EN 16615 sur *Candida albicans* et *Candida auris* : actif en **2 minutes**

#### Moisissures

- EN 13624 / EN 17387 sur *Aspergillus fumigatus* : actif en **30 minutes**

### **Mycobactéries**

- EN 14348 sur *Mycobacterium terrae* : actif en **30 minutes**

### **Virus**

- Virucide sur virus enveloppés EN 14476 / EN 16777 : actif en **2 minutes**
- Norovirus et Rotavirus EN 14476 / EN 16777 : actif en **15 minutes**
- Adénovirus type 5 EN 14776 : actif en **45 minutes**

### **Compatibilité avec les sondes d'échographie**

L'utilisation de **SEPTISPRAY 2 sur les sondes d'échographie** doit respecter les **recommandations du fabricant de l'équipement** ainsi que les protocoles internes de l'établissement.

### **Conditions d'utilisation**

- Ne pas rincer après application
- Rinçage requis uniquement pour les surfaces en contact direct avec les muqueuses ou lorsqu'une désinfection consécutive est nécessaire

### **Indications d'emploi - SEPTISPRAY 2**

- 1Pulvériser le produit sur la surface à traiter ou sur un non-tissé propre.
- 2Nettoyer minutieusement la surface.
- 3Laisser agir selon le temps de contact requis.
- 4Ne pas rincer, sauf indication spécifique.
- 5Changer de support non-tissé pour chaque équipement.

### **Conformité et informations réglementaires**

- Dispositif médical **classe IIa** (Règlement (UE) 2017/745)
- Usage professionnel uniquement
- Produit non stérile
- Sans latex, sans phtalates, sans ingrédients d'origine animale ou biologique
- Conditions de stockage : entre +5 °C et +25 °C, à l'abri du gel et de la chaleur
- Durée de validité : **23 mois** après la date de fabrication

### **Conditionnement**

- Flacon pulvérisateur **750 ml**
- Référence : **SP2-750**

Niveau de désinfection: Niveau 1 (bas)

Référence : SP2-750