

CUBE PESSAIRE PERFORÉ AVEC BOUTON DR. ARABIN Pessaire vaginal en silicone pour prolapsus génital de stade 3 et 4



Description du produit :

Le **cube pessaire perforé avec bouton Dr. Arabin** est un dispositif médical fabriqué en **silicone de haute qualité**. Il est équipé d'un **bouton avec fil solidement soudé**, facilitant la manipulation, le retrait et le remplacement du dispositif par la patiente.

Depuis l'introduction du produit, les modèles ont été continuellement améliorés afin de **réduire au minimum le risque de désolidarisation du fil**. Le pessaire peut être stocké à une température comprise entre **0 et 50 °C**, à l'abri des rayonnements UV et sans contact avec des milieux réactifs, gaz, ozone ou huiles minérales.

Indication / Utilisation prévue

Le cube pessaire Dr. Arabin est indiqué dans les cas de **prolapsus génital de grade 3 à 4**. La version perforée est **plus facile à manipuler** que la version non perforée.

Les cube-pessaires peuvent également être utilisés pour :

- la dissolution de cicatrices,
- l'extension des obstructions vaginales,
- le traitement de troubles de la miction ou de la cohabitation,
- la préparation avant une intervention chirurgicale du prolapsus afin d'améliorer la circulation tissulaire.

La **flexibilité du matériau** facilite l'auto-gestion par la patiente, après formation par un professionnel de santé.

Modalités d'utilisation et précautions

La durée maximale d'utilisation ininterrompue est de **30 jours** (dispositif médical de **classe IIa**). Il est toutefois recommandé que la patiente retire le pessaire chaque soir et le réinsère le matin.

Le produit est destiné à un **usage strictement individuel** et ne doit pas être utilisé par d'autres patientes. Avant chaque insertion, la surface du pessaire doit être inspectée. En cas de dommage, le dispositif doit être remplacé.

Le cube pessaire doit être inséré avec **le bouton orienté vers l'utérus** et **le fil dirigé vers le vagin**. Le nettoyage peut être effectué à l'eau courante, **sans utilisation de désinfectant**.

Tailles disponibles

Le cube pessaire perforé avec bouton Dr. Arabin est disponible dans les tailles suivantes :

Taille 0 (25 mm), Taille 1 (29 mm), Taille 2 (32 mm), Taille 3 (37 mm), Taille 4 (41 mm), Taille 5 (45 mm), Taille 6 (55 mm), Taille 7 (65 mm), Taille 8 (70 mm), Taille 9 (75 mm).

Taille pessaire: Taille 0 - 25 mm, Taille 1 - 29 mm, Taille 2 - 32 mm, Taille 3 - 37 mm, Taille 4 - 41 mm, Taille 5 - 45 mm, Taille 6 - 55 mm, Taille 7 - 65 mm, Taille 8 - 70 mm, Taille 9 - 75 mm

Référence : ARWPLKX