

FILTRE COMPENSATEUR "PETIT PRISME"

Les filtres compensateurs sont utilisés dans le cas de structures présentant des différences d'absorption importantes.



Description du produit :

Caractéristiques

- Possède deux gradients: 37° et 52°.
- Du velcro est incorporé à chaque extrémité; d'autre velcro auto-adhésif (fourni) sert à fixer le filtre au collimateur ou à une cassette.
- S'emploie aussi auprès du malade.
- Spécification – Petit prisme standard
 - Longueur: 21 cm – Largeur : 8 cm – Hauteur: 4 cm
 - avec du velcro auto-adhésif, et 4 plaquettes de fixation.

Utilisations

- Abdomen, double contraste, décubitus latéral
- Certain poumons à base large
- Extrémités
- Calcanéum, incidence axiale
- Olécrane, incidence axiale
- Rotule et tubérosité du tibia

Le petit prisme employé au collimateur

Le petit prisme est fixé au collimateur dans n'importe quelle position sur du velcro auto-adhésif (fourni). Ses gradients sont quatre fois moindres à 100 cm de distance, à cause de l'agrandissement.

Le décubitus latéral du lavement D.C. est amélioré lorsqu'on couvre 10 cm de la partie haute d'un abdomen tombant avec l'ombre du petit prisme. Le filtre est aussi utile sur des poumons ayant une base large afin d'atténuer la sur-

pénétration des sommets. Parfois utile sur les parties plus minces des extrémités. Le petit prisme employé auprès du malade.

Pour le calcanéum (ou l'olécrane), projection axiale.

La rotule intérieure est moins pénétrée en employant le petit prisme. Si la cassette est verticale, employez du velcro auto-adhésif pour tenir le filtre.

Référence : IMFI-04