


TRANSGLIDE "PULL SHEET" Patiëntenoverdrachtsformulier

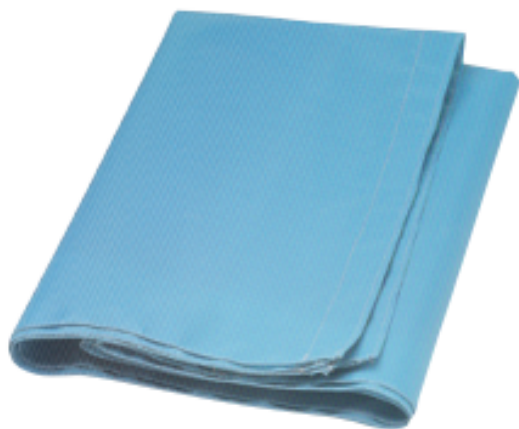

Productomschrijving:

Hoe te gebruiken?

- 1) Draai de patiënt opzij met behulp van het "treklaken", duw de Transglide onder het laken en leg de patiënt terug op de Transglide. Houd het "treklaken" met beide handen vast en houd de rug recht en rechtop
- 2) Schuif de patiënt met behulp van het laken over de Transglide, waarbij u een gelijkmatige beweging maakt en de rug recht houdt. Een tweede persoon helpt door zachtjes te duwen.
- 3) Zodra de patiënt in de juiste positie op het bed / de bank / de röntgentafel etc. is gelegd, draait u hem of haar iets opzij. De tweede assistent trekt de Transglide aan de onderkant los en haalt hem zo onder de patiënt vandaan.

Karakteristieken :

- éénnvoudig te gebruiken door één of twee zorgverleners
- Gemakkelijk schoon te maken en zuurbestendig
- Röntgenstralen doorschijnend
- Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
- Afmetingen : 150 x 150 cm / 60 x 60 inch

Referentie -