

EASYVIEW HE - SPUITBESCHERMING

Volledig gamma van spuitbeschermers in wolfram voor hoge energie



Productomschrijving:

Easyview injectiespuitafschermingen zijn verkrijgbaar in een breed en compleet assortiment maten en afschermingen (van 2 tot 7 mm wolfram) om gebruikers een ergonomische en beschermende oplossing te bieden die essentieel is tijdens de voorbereiding, overdracht en injectie van radiofarmaceutische doses met alle energieën voor SPECT- en PET-activiteiten. Ongeacht het te hanteren radio-isotoop: 99mTc, 111In, 123I, 177Lu, 201Tl, 131I, 18F, 68Ga en de vereiste toedieningsmethode: directe injectie in de patiënt, aansluiting op een katheter of een 3-wegklep, de comfortabele greep van dit spuitschild zorgt voor beweeglijkheid, precisie en een snelle uitvoering van de handeling, waardoor de contacttijd met het radioactieve element tot een minimum wordt beperkt. Deze serie ergonomische spuitschilden voldoet aan de hoogste wettelijke normen en is goedgekeurd voor verkoop op de Amerikaanse markt.

Het belangrijkste deel van het Easyview-spuitschild is gemaakt van een wolframhuls (van 2 tot 7 mm afhankelijk van het model) die minutieus is bewerkt om een perfect gladde afwerking te krijgen die meer comfort biedt en helpt bij het reinigen en ontsmetten door onderdompeling of met aangepaste doekjes. De demping van 140 KeV gammastraling van 99mTc is meer dan 99,7% voor 740 MBq activiteit en 86,95% demping voor 300 MBq activiteit van 68Ga.

Dankzij het grote afgeschermd kijkvenster van loodglas met een hoge dichtheid van 5.2 met vergrooteffect is het volume in de spuit en de volledige schaalverdeling beter zichtbaar, wat nauwkeurige monsternames vergemakkelijkt en het dagelijkse werkcomfort verbetert. Indien nodig kan het kijkvenster van loodglas worden vervangen door een volledig wolframreservepakket.

Gegraveerde identificatiegegevens die het model en de energie (LME of HE) aangeven op het wolframhuls van de Easyview maken het gemakkelijker om het te gebruiken spuitschild te kiezen in overeenstemming met de capaciteit van de spuit en het gebruikte radio-isotoop. De gegraveerde gegevens vergemakkelijken ook het inventariseren en bestellen van accessoires.

Een zwarte kunststof vergrendeling zorgt ervoor dat de spuit goed vastzit in het spuitenkapje en houdt de positie vast door ongewenste willekeurige beweging te voorkomen.

Dankzij het ingenieuze ontwerp van de Easyview kan de gebruiker het kijkvenster van loodglas (of de volledige wolframreservekit) onafhankelijk vervangen door, indien nodig, één schroef te verwijderen, voor een eenvoudige vervanging of voor grondige reiniging en ontsmetting, maar ook voor het vervangen van de kunststof spuitvergrendeling met het meegeleverde gereedschap (torxsleutel).

Referenties	Producten met afmetingen
00024946	EASYVIEW HE syringe shield - 1mL/70mm
00024947	EASYVIEW HE syringe shield - 1mL/76mm
00024953	EASYVIEW HE syringe shield - 1mL+/75mm (larger diameter)
00024948	EASYVIEW HE syringe shield - 2mL/50mm
00024949	EASYVIEW HE syringe shield - 2mL/53mm
00024950	EASYVIEW HE syringe shield - 2,5mL/59mm
00024952	EASYVIEW HE syringe shield - 3mL/69mm
00024954	EASYVIEW HE syringe shield - 5mL/57mm
00024951	EASYVIEW HE syringe shield - 5mL/61mm
00024955	EASYVIEW HE syringe shield - 5mL/64mm
00024956	EASYVIEW HE syringe shield - 10mL/73mm
00024957	EASYVIEW HE syringe shield - 10mL/75mm
00024958	EASYVIEW HE syringe shield - 10mL/83mm
00028075	EASYVIEW HE syringe shield - 10mL/85mm

Easyview - Capaciteit: 1 mL, 2 mL, 2,5 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL

Easyview - Lengte: 70 mm, 75 mm, 76mm, 50 mm, 53 mm, 59 mm, 69 mm, 57 mm, 61 mm, 64 mm, 73 mm, 83 mm, 85 mm

Referentie LEMXXXXX