

NUCLEAN - DESINFECTIEDOEKJES VOOR OPPERVLAKKEN
Geïmpregneerde doekjes voor oppervlaktedesinfectie in medische omgevingen



Productomschrijving:

NUCLEAN is een **oppervlaktedesinfectiemiddel** voor medische, klinische en ziekenhuisomgevingen. **NUCLEAN desinfectiedoekjes** zijn geschikt voor het reinigen en desinfecteren van **niet-onderdompelbare medische hulpmiddelen**, zonder naspoelen (behalve oppervlakken met voedselcontact).

De gebruiksklare NUCLEAN-doekjes combineren een **reinigende en desinfecterende werking** met snelle droging zonder strepen. De formulering is **hypoallergeen** en geschikt voor frequent gebruik in de zorg.

Belangrijkste kenmerken

- Gebruiksklare geïmpregneerde doekjes
- Geschikt voor niet-onderdompelbare medische oppervlakken
- Geen naspoelen vereist (behalve bij voedselcontact)
- Sneldrogend en streeploos
- Hypoallergene formulering
- Volledige desinfecterende werking binnen 5 minuten

Verpakking

- Dispenserdoos met **120 geïmpregneerde doekjes**
- Afmetingen doekjes: **190 x 130 mm**

Microbiologische werkzaamheid - NUCLEAN doekjes

Bacteriën

- EN 13727: actief binnen 1 minuut
- EN 1276: actief binnen 5 minuten
- EN 13697: actief binnen 5 minuten
- EN 14561: actief binnen 5 minuten

- EN 16615: actief binnen 5 minuten

Gisten / Schimmels

- EN 13624: actief binnen 1 minuut
- EN 1650: actief binnen 5 minuten
- EN 13697: actief binnen 5 minuten
- EN 14562: actief binnen 5 minuten
- EN 16615: actief binnen 5 minuten

Virussen

- EN 14476: actief binnen 30 seconden tot 5 minuten afhankelijk van het virus

Sporen

- EN 13704: *Clostridium difficile* - actief binnen 15 minuten

Gebruiksaanwijzing - NUCLEAN doekjes

- 1Neem één doekje uit de dispenser.
- 2Reinig het oppervlak grondig.
- 3Laat het product **5 minuten** inwerken (15 minuten bij *Clostridium difficile*).
- 4Niet naspoelen (behalve bij voedselcontact).
- 5Gebruik één doekje per oppervlak.
- 6Sluit de dispenser na gebruik.

Referentie AL4004