

NUCLEAN - DESINFECTIESPRAY VOOR OPPERVLAKKEN
Gebruiksklare spray voor desinfectie van oppervlakken in medische omgevingen



Productomschrijving:

NUCLEAN is een **gebruiksklare desinfectiespray voor oppervlakken**, ontwikkeld voor medische, klinische en ziekenhuisomgevingen. Het product is geschikt voor de **reiniging en desinfectie van niet-onderdompelbare medische hulpmiddelen**, zonder naspoelen (behalve bij oppervlakken die in contact komen met voedsel).

De NUCLEAN spray combineert een **reinigende en desinfecterende werking** met een snelle droging zonder strepen. De **hypoallergene formulering** is geschikt voor frequent gebruik in de zorgsector.

Belangrijkste kenmerken

- Gebruiksklare spray
- Voor niet-onderdompelbare medische hulpmiddelen
- Geen naspoelen nodig (behalve voedselcontactoppervlakken)
- Snel drogend, laat geen resten achter
- Hypoallergene samenstelling
- Volledige desinfecterende werking binnen 5 minuten

Verpakking

- **Sprayflacon van 500 ml**
- Te gebruiken met non-woven reinigingsdoeken (bv. bionet doeken 40 × 38 cm, ref. 712)

Microbiologische eigenschappen - NUCLEAN Spray

Bacteriën

- EN 13727: actief binnen 1 minuut
- EN 1276: actief binnen 5 minuten
- EN 13697: actief binnen 5 minuten
- EN 14561: actief binnen 5 minuten

Gisten / Schimmels

- EN 13624: actief binnen 1 minuut
- EN 1650: actief binnen 5 minuten
- EN 13697: actief binnen 5 minuten
- EN 14562: actief binnen 5 minuten

Virussen

- EN 14476: Norovirus, HIV-1 – actief binnen 30 seconden
- EN 14476: Hepatitis B, Herpesvirus, Influenza A/H1N1 – actief binnen 1 minuut
- EN 14476: Hepatitis C, Rotavirus, Adenovirus – actief binnen 5 minuten

Sporen

- EN 13704: *Clostridium difficile* – actief binnen 15 minuten
- NF T 72-281: *Bacillus subtilis* – actief binnen 5 minuten

Gebruiksaanwijzing - NUCLEAN Spray

- 1Bevochtig een schone non-woven doek met de oplossing.
- 2Reinig het oppervlak grondig.
- 3Laat **5 minuten** inwerken (15 minuten voor *Clostridium difficile*).
- 4Niet naspoelen, behalve bij voedselcontactoppervlakken.
- 5Gebruik een nieuwe doek voor elk hulpmiddel.

Referentie EC500