


DR. ARABIN HYBRIDE SOFT PESSARIUM - BAARMOEDERVERZAKKING STADIUM II-III, GEVOELIGE
MUCOSA

Zacht siliconen hybride pessarium voor matige baarmoederverzakking en gevoelige
vaginale mucosa

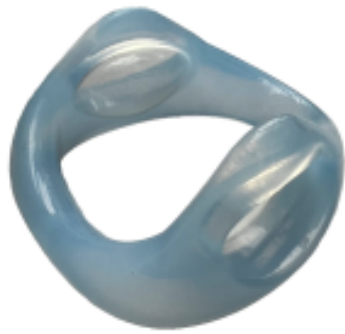

Productomschrijving:

Het **Dr. Arabin Hybride Soft pessarium** is ontworpen voor de behandeling van **baarmoederverzakking stadium II-III** en bepaalde vormen van **incontinentie**, met name bij patiënten met een **gevoelige vaginale mucosa**. De transparante *Soft*-variant is geschikt voor een normale levensstijl, na een operatie of bevalling, en bij minder uitgesproken prolaps.

Hybride pessaria zijn ontwikkeld om het comfort en de zelfredzaamheid van de patiënt te verbeteren. De **deevormige contour met concave zuigzones** zorgt voor een betere fixatie dan conventionele pessaria, zonder de vagina te verwijderen. Het hulpmiddel combineert twee mechanische effecten: anterieure ondersteuning op de symfyse en laterale stabilisatie via geïntegreerde uitsparingen in de wand.

Het ontwerp maakt **centrale afvoer van afscheiding of bloed** mogelijk en laat gelijktijdig gebruik van tampons toe. Dit pessarium werd ontwikkeld voor vroege bekkenbodemstoornissen veroorzaakt door letsels van de levatorspier in combinatie met een vergrote vaginale hiatus. Trekproeven toonden een fixatie die ongeveer **vijf keer hoger** ligt dan bij conventionele modellen.

Het Hybride Soft pessarium is bedoeld om **bekkenorganen te ondersteunen** en druk- en incontinentieklachten te verminderen, ook tijdens de zwangerschap en de postpartumperiode, of wanneer andere pessaria onvoldoende worden verdragen of vastgehouden.

De maximale aaneengesloten draagtijd bedraagt **30 dagen (klasse IIa)**. Het wordt echter aanbevolen het pessarium elke avond te verwijderen en 's ochtends opnieuw in te brengen. De patiënt dient door een zorgverlener geïnformeerd te worden over gebruik, wisselen en eventuele aanvullende therapieën. Het hulpmiddel is uitsluitend bedoeld voor **gebruik door één patiënt**. Voor elke inbreng moet het oppervlak worden gecontroleerd; bij scheurtjes of verkleuring dient het pessarium te worden vervangen.

Het pessarium wordt gereinigd onder stromend water, **zonder gebruik van desinfectiemiddelen**. Om de hygiëne bij zelfgebruik te waarborgen, kan een bewaardoos worden aanbevolen.

Beschikbare maten

Lengtediameters: 55 mm / 60 mm / 65 mm / 70 mm / 75 mm / 80 mm

Pessarium maat: Maat 2 - Ø55 mm, Maat 3 - Ø60 mm, Maat 4 - Ø65 mm, Maat 5 - Ø70 mm, Maat 6 - Ø75 mm, Maat 7 - Ø80 mm

Referentie -