

## STERANIOS 2% – KOUDE DESINFECTIE VOOR MEDISCHE HULPMIDDELEN Oplossing voor hoog-niveau desinfectie door onderdompeling van medische hulpmiddelen



### Productomschrijving:

**STERANIOS 2%** is een **gebruiksklare koude desinfectieoplossing op basis van glutaaraldehyde**, bedoeld voor de **hoog-niveau desinfectie van thermogevoelige medische hulpmiddelen**. Het product wordt gebruikt door onderdompeling in een speciaal desinfectiebad voor chirurgisch, medisch en endoscopisch materiaal.

De oplossing dient te worden gebruikt **in combinatie met een voorafgaande reinigende desinfectant**. Het desinfectiebad kan **tot 7 dagen** worden behouden, mits de concentratie glutaaraldehyde regelmatig wordt gecontroleerd met reactieve teststrips.

- **Hoog-niveau desinfectie door onderdompeling**
- **Gebruiksklare oplossing**
- **Geschikt voor thermogevoelige medische hulpmiddelen**
- **Gebruik in een speciaal dompelbad**

### Microbiologische werkzaamheid

- **Bacteriedodend** (EN 13727, EN 14561, Helicobacter pylori): actief in 10 minuten
- **Mycobacteriedodend** (EN 14348, EN 14563, Mycobacterium massiliense): actief in 10 minuten
- **Schimmeldodend** (EN 13624, EN 14562): actief in 10 minuten
- **Virusdodend** (EN 14476): actief in 10 minuten
- **Sporendodend**: aangetoond na 1 uur bij 20 °C (NF T 72-230/231, EN 13704)

### Gebruiksaanwijzing

- 1Voorreiniging:** reinig het medische hulpmiddel met een geschikte voor-desinfecterende reiniger en spoel grondig. Voor endoscopen: borstelen en irrigeren.
- 2Desinfectie:** giet STERANIOS 2% in een speciaal dompelbad en dek af. Contacttijd: **10 minuten**.
- 3Spoelen:** grondig spoelen met steriel of gefilterd water (0,2 µm), zowel binnen- als buitenzijde.
- 4Drogen en opslag:** afdrogen met een wegwerpdoek en aseptisch bewaren tot volgend gebruik.

Ontsmettingsniveau: Niveau 3 (hoog)

Referentie AN382034