

ANIOS'CLEAN EXCEL D - REINIGINGS- EN VOOR-DESINFECTIEMIDDEL
Geconcentreerd reinigings- en voor-desinfectiemiddel voor medische instrumenten



Productomschrijving:

ANIOS'CLEAN EXCEL D is een geconcentreerde oplossing voor het **reinigen en voor-desinfecteren van medische instrumenten**. De niet-corrosieve samenstelling is compatibel met een breed scala aan materialen en geschikt voor gebruik vóór sterilisatie.

Dit voor-desinfecterend reinigingsmiddel wordt aanbevolen voor **chirurgische en medische instrumenten, thermosensitieve hulpmiddelen en endoscopisch materiaal**. Het product wordt gebruikt via onderdompeling, bij de vereiste verdunning, binnen professionele reinigingsprotocollen.

ANIOS'CLEAN EXCEL D biedt een **volledige microbiologische werking**, waaronder bactericide, gistdodende, tuberculocide en virucide activiteit. De concentratie en contacttijd moeten worden aangepast aan het gewenste effect.

- **Geconcentreerde oplossing** voor professioneel gebruik
- **Reiniging en voor-desinfectie** vóór sterilisatie
- **Compatibel** met vele materialen
- **Gebruik door onderdompeling**
- **Uiterlijk:** heldere blauwe oplossing
- **Verpakkingen:** jerrycan van 1 L of 5 L

Gebruiksaanwijzing:

Gebruik verdund, met een minimale contacttijd van **5 minuten**. Dompel het hulpmiddel volledig onder en dek het bad af tijdens de contacttijd. Borstel bij zichtbare vervuiling. Spoel na behandeling grondig af met leidingwater. Vervang de oplossing minstens éénmaal per dag of zodra deze zichtbaar vervuild is.

Verpakking: Jerrycan van 1 L, 2 jerrycans van 5 L met pomp

Referentie -