

HEADFIX: FIXATIEKUSSEN VOOR CT-SCAN Positioneringskussen voor het hoofd voor CT-scan



Productomschrijving:

De CT HeadFix biedt een geïntegreerde, snelle en hygiënische positioneringsoplossing om het hoofd tijdens CT-onderzoeken te fixeren. Bovendien is het compatibel met de hoofdhouders van de belangrijkste fabrikanten.

Bijkomende toepassingen:

- CT HeadFix werkt ook heel goed in PET/CT-omgevingen
- CT HeadFix kan ook worden gebruikt voor een voet/enkel in de hoofdhouder
- CT HeadFix kan ook worden gebruikt voor een hand/pols (plooien en rond de hand oprollen en een riem gebruiken om alles op zijn plaats te houden)

Reiniging en ontsmetting:

- Gebruik desinfectiedoekjes, spuit geen desinfectiemiddel rechtstreeks op het product
- Alle algemeen gebruikte desinfectiemiddelen voor de ontsmetting van oppervlakken en doekjes kan worden gebruikt

Tips voor gebruik:

- Laat na gebruik de lucht volledig ontsnappen: (begin met leeglopen terwijl de patiënt nog in de houder ligt, plooi de CT HeadFix op en laat de lucht ontsnappen door op het ventiel en de positioneringshulp te drukken)
- Mensen hebben de neiging om de CT HeadFix te blijven opblazen, zelfs als de patiënt reeds is gestabiliseerd
- Let goed op de oren als de patiënt in de CT HeadFix wordt geplaatst

Referentie PEARL005