


HOOFD BESCHERMINGSKUSSEN - HOEFIJZERVORM Hoofd en nek gel positioner voor operatietafel.

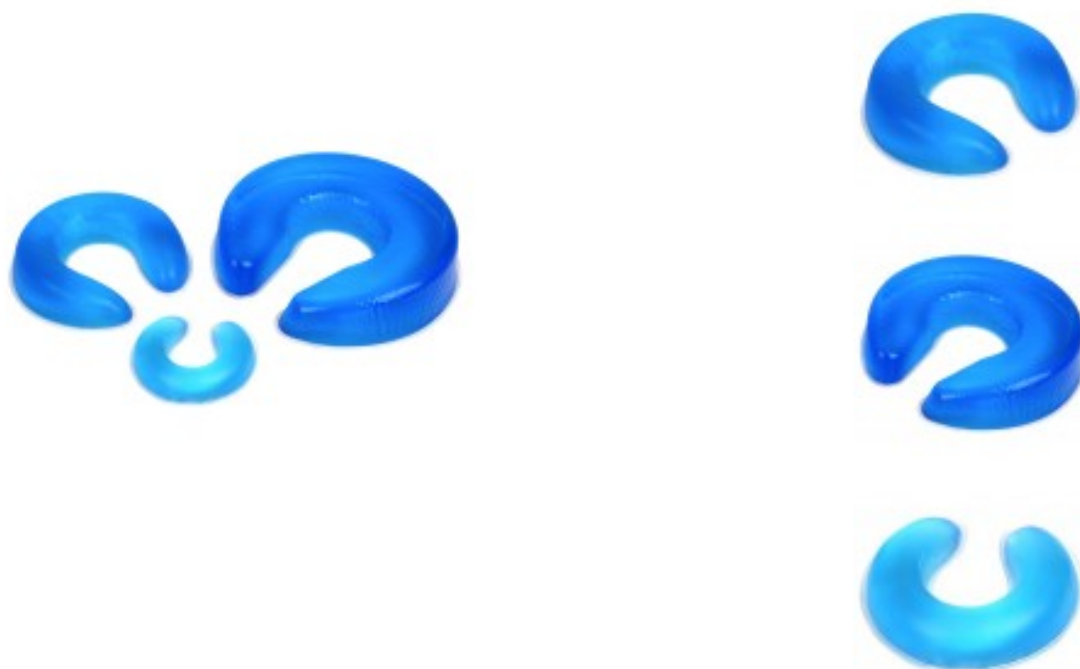

Productomschrijving:

Het kan worden gebruikt als nek-, hoofd- en gezichtsondersteuning tijdens alle soorten operaties, met een gemakkelijke toegang voor intubatie.

Materialen

Het is gemaakt van een amorfe polyurethaangel met een dichtheid van 0,99 gr/cm³.

Onderhoud en reiniging

- De gel positioners zijn eenvoudig te reinigen met elk schoonmaakmiddel en / of desinfectiemiddel voor de operatiekamer.
- Voorkom dat de gelpositioneerders langdurig in het reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel worden ondergedompeld.

Opslag en verwijdering

- Houd de klepstandstellers, indien mogelijk, op een vlakke ondergrond.
- Vermijd het plaatsen van zware of scherpe voorwerpen op de klepstandstellers.
- Houd de geltemperatuur tussen -18 en 50 graden.
- Blijf uit de buurt van licht-, vocht- en warmtebronnen.
- Gooi het apparaat weg in overeenstemming met de huidige voorschriften voor milieubescherming en gescheiden afvalinzameling.

Pakket

1 stuk.

Maat van gelpositioneringskussen 1: 9 x 4 x 2 cm, 14 x 6 x 3,5 cm, 20 x 7,5 x 4,5 cm, Kies een optie

Referentie CDP0000