

ECHO CLEAN - DESINFECTIEDOEKJES NIVEAU 2

Geïmpregneerde doekjes voor intermediaire desinfectie van echoprobes



Productomschrijving:

ECHO CLEAN-doekjes zijn bedoeld voor het **reinigen** en de **intermediaire desinfectie** van **echografiesondes**. Ze zijn geschikt voor gebruik op **endocavitare sondes** en maken intermediaire desinfectie mogelijk volgens het SF2H-protocol, met één doekje per stap (reiniging en desinfectie).

ECHO CLEAN is getest en goedgekeurd door fabrikanten van echografietoestellen. De **niet-corrosieve** formule is geschikt voor gevoelige medische apparatuur die regelmatig aan desinfectiemiddelen wordt blootgesteld.

- **Totale werkzaamheid binnen 5 minuten**
- Speciaal ontwikkeld voor echografiesondes
- Zonder aldehyden en kleurstoffen
- Sneldrogend
- Laat geen resten achter
- Klaar voor gebruik
- **Dispenserdoos met 120 doekjes, 190 x 130 mm**

Fabrikantcertificeringen

ECHO CLEAN is gecertificeerd voor de desinfectie van echografiesondes door de volgende fabrikanten:

- GE
- Fujifilm Sonosite
- Siemens Healthineers

Gebruiksaanwijzing

- 1Neem één doekje uit de dispenser.
- 2Reinig het oppervlak grondig.
- 3Laat het product **5 minuten** inwerken (**15 minuten** voor *C. difficile*). Niet naspoelen (behalve bij oppervlakken met voedselcontact).

4Gebruik voor elk hulpmiddel een nieuw doekje.
5Sluit de dispenser zorgvuldig na gebruik.

Ontsmettingsniveau: Niveau 2 (gemiddeld)

Referentie -