

ECHO CLEAN - DESINFECTIESPRAY NIVEAU 2 Spray voor intermediaire desinfectie van echografiesondes



Productomschrijving:

ECHO CLEAN spray is een gebruiksklare oplossing voor het **reinigen** en de **intermediaire desinfectie** van **echografiesondes**. Het product is geschikt voor endocavitare sondes en kan worden gebruikt volgens de **SF2H-protocollen**, met een schoon non-woven doekje per stap.

ECHO CLEAN is getest en goedgekeurd door fabrikanten van echografietoestellen. De **niet-corrosieve formule** is geschikt voor gevoelige medische apparatuur die regelmatig aan desinfectiemiddelen wordt blootgesteld.

- **Volledige werking binnen 5 minuten**
- Speciaal ontwikkeld voor echografiesondes
- Zonder aldehyden en kleurstoffen
- Sneldrogend
- Laat geen resten achter
- Klaar voor gebruik
- **Sprayflacon van 1 liter**

Fabrikantcertificeringen

ECHO CLEAN is gecertificeerd voor de desinfectie van echografiesondes door de volgende fabrikanten:

- GE
- Fujifilm Sonosite
- Siemens Healthineers

Gebruiksaanwijzing

- 1Bevochtig een schoon non-woven doekje met de oplossing.
- 2Reinig het oppervlak van de sonde grondig.
- 3Laat het product **5 minuten** inwerken (**15 minuten** voor *Clostridium difficile*).
- 4Niet naspoeien (behalve bij oppervlakken met voedselcontact).

5Gebruik voor elk hulpmiddel een nieuw doekje.

Ontsmettingsniveau: Niveau 2 (gemiddeld)

Referentie -