

SPOR'ACTIV - DESINFECTIEVLOEISTOF NIVEAU 3 Desinfectievloeistof voor ultrasone sondes



Productomschrijving:

Meer informatie over ontsmettingsniveaus hier.

Desinfectie op hoog niveau in 3 minuten!!!

- Gebruik :
 - Stap 1: voorbehandeling met een Clean'Up doekje
 - Stap 2: desinfectie op hoog niveau met een nieuw Clean'Up doekje en één verstuiving met Spor'Activ.
- Clean'Up: alcoholvrije doekjes
- Spor'Activ: gestabiliseerde perazijnzuuroplossing

Kenmerken

- Bidon van 1 liter

Ontsmettingsniveau: Niveau 3 (hoog)

Referentie -