

## SEPTISPRAY 2 – SPRAY VOOR OPPERVLAKTEDESINFECTIE OP LAAG NIVEAU Alcoholvrije oplossing voor laag-niveau desinfectie van medische hulpmiddelen



### Productomschrijving:

**SEPTISPRAY 2** is een **alcoholvrije reinigende en desinfecterende oplossing** voor de **laag-niveau desinfectie** van herbruikbare medische hulpmiddelen, zowel invasief als niet-invasief.

SEPTISPRAY 2 is ontwikkeld om gevoelige materialen te beschermen en is geschikt voor **desinfectie door afvegen** in medische praktijken, beeldvormingsdiensten en klinische omgevingen. De microbiologische werking voldoet aan de geldende normen en garandeert een brede materiaalcompatibiliteit.

### Belangrijkste kenmerken

- Alcoholvrije reinigende desinfectant
- Laag-niveau desinfectie door afvegen
- Geschikt voor herbruikbare invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen (klasse IIa)
- Goede materiaalcompatibiliteit dankzij lage oppervlaktespanning
- Kleurloze vloeistof, geurloos
- pH 6,5–7,5
- Klaar voor gebruik

### Microbiologische eigenschappen (vuile omstandigheden, 20 °C)

#### Bacteriën

- EN 1276 / EN 13727 / EN 16615: werkzaam in **2 minuten**

#### Gisten

- EN 1650 / EN 13624 / EN 16615 op *Candida albicans* en *Candida auris*: werkzaam in **2 minuten**

#### Schimmels

- EN 13624 / EN 17387 op *Aspergillus fumigatus*: werkzaam in **30 minuten**

### Mycobacteriën

- EN 14348 op *Mycobacterium terrae*: werkzaam in **30 minuten**

### Virussen

- Omhulde virussen EN 14476 / EN 16777: werkzaam in **2 minuten**
- Norovirus en Rotavirus EN 14476 / EN 16777: werkzaam in **15 minuten**
- Adenovirus type 5 EN 14776: werkzaam in **45 minuten**

### Compatibiliteit met echoprobes

Het gebruik van **SEPTISPRAY 2 op echoprobes** moet gebeuren volgens de **aanbevelingen van de fabrikant** en de interne protocollen van de zorginstelling.

### Gebruiksaanwijzing

- 1Verstuif het product op het oppervlak of op een schone niet-geweven doek.
- 2Reinig het oppervlak grondig.
- 3Laat het product inwerken volgens de vereiste contacttijd.
- 4Niet naspoelen, tenzij specifiek vereist.
- 5Gebruik een nieuwe doek voor elk hulpmiddel.

### Regelgeving en conformiteit

- Medisch hulpmiddel **klasse IIa** (EU-verordening 2017/745)
- Uitsluitend voor professioneel gebruik
- Niet-steriel product
- Latexvrij, ftalaatvrij, zonder dierlijke of biologische bestanddelen
- Opslag: tussen +5 °C en +25 °C, beschermd tegen vorst en hitte
- Houdbaarheid: **23 maanden** na productiedatum

### Verpakking

- Sprayflacon 750 ml
- Referentie: **SP2-750**

Ontsmettingsniveau: Niveau 1 (laag)

Referentie SP2-750