

SEPTIWIPES - DESINFECTIEDOEKJES NIVEAU 1  
Alcoholvrije doekjes voor laag-niveau desinfectie van medische hulpmiddelen



### Productomschrijving:

**SEPTIWIPES** zijn alcoholvrije geïmpregneerde doekjes, bedoeld voor de **reiniging en laag-niveau desinfectie** van **niet-invasieve herbruikbare medische hulpmiddelen**. Ze zijn bijzonder geschikt voor **alcoholgevoelige materialen**, met name **oppervlakkige echografieprobes**.

Gebruiksklaar en eenvoudig te integreren in desinfectieprotocollen door afwrijven in medische praktijken, beeldvormingsdiensten, klinieken en zorginstellingen. De formulering beschermt gevoelige materialen en garandeert microbiologische werkzaamheid conform de geldende normen.

### Belangrijkste kenmerken

- Alcoholvrije desinfectiedoekjes
- Voor laag-niveau desinfectie van niet-invasieve medische hulpmiddelen
- Aanbevolen voor oppervlakkige echografieprobes
- Afmeting doekjes: **140 x 200 mm**
- **Neutrale pH (pH 7)**
- Gebruiksklaar, **geen naspoelen nodig**

### Microbiologische werking

#### Bacteriën & gisten

- EN 16615, EN 1040, EN 13727, EN 1275, EN 13624 (vuile omstandigheden): **actief binnen 1 minuut**

#### Virussen

- EN 14476 (schone omstandigheden) & RKI/DVV-protocol: **actief binnen 30 seconden**
- EN 14476 (vuile omstandigheden): **actief binnen 2 minuten**

### Compatibiliteit met echografieprobes

SEPTIWIPES zijn gecertificeerd voor desinfectie van echografieprobes van de volgende fabrikanten: **GE, Siemens, Philips, Canon Medical, Shimadzu, SonoAce, Aloka, Esaote, Hitachi.**

### **Regelgeving & conformiteit**

- Medisch hulpmiddel **klasse IIa** (EU-verordening 2017/745)
- **Niet-steriel**, uitsluitend voor professioneel gebruik
- Alcoholvrij, latexvrij, ftalaatvrij
- Houdbaarheid na opening: **3 maanden** (doos goed sluiten)
- Opslagcondities: **+5 °C tot +25 °C**

### **Verpakking**

- Dispenserdoos met **100 doekjes**
- Referentie: **SP2000**

### **Gebruiksaanwijzing**

- 1Neem één doekje uit de dispenser.
- 2Reinig het oppervlak of medisch hulpmiddel grondig.
- 3Laat het product gedurende de vereiste contacttijd inwerken.
- 4Niet naspoelen.
- 5Gebruik een nieuw doekje voor elk hulpmiddel.

Ontsmettingsniveau: Niveau 1 (laag)

Referentie SP2000