

DR. ARABIN GEPERFOREERDE KUBUSPESSARIUM MET KNOP  
Siliconen vaginaal pessarium voor genitale prolaps graad 3-4



### Productomschrijving:

Het **Dr. Arabin geperforeerde kubuspessarium met knop** is een medisch hulpmiddel vervaardigd uit **hoogwaardig siliconenmateriaal**. Het is voorzien van een **knop met stevig vastgelaste draad**, wat het hanteren, verwijderen en vervangen door de patiënte vergemakkelijkt.

Sinds de introductie van het product zijn de modellen continu verbeterd om **het risico op loskomen van de draad tot een minimum te beperken**. Het pessarium kan worden opgeslagen bij temperaturen tussen **0 en 50 °C**, beschermd tegen UV-straling en zonder contact met reactieve stoffen, gas, ozon of minerale olie.

### Indicatie / Beoogd gebruik

Het Dr. Arabin kubuspessarium is geïndiceerd voor **genitale prolaps graad 3 tot 4**. De geperforeerde versie is **eenvoudiger te hanteren** dan de niet-geperforeerde versie.

Kubuspessaria kunnen ook worden gebruikt voor:

- het losmaken van littekenweefsel,
- het verwijderen van vaginale obstructies,
- de behandeling van mictie- of cohabitatieproblemen,
- gebruik voorafgaand aan prolapschirurgie om de weefseldoorbloeding te verbeteren.

De **flexibiliteit van het materiaal** vergemakkelijkt zelfmanagement door de patiënte na instructie door een zorgverlener.

### Gebruik en voorzorgsmaatregelen

De maximale ononderbroken gebruiksduur bedraagt **30 dagen** (medisch hulpmiddel **klasse IIa**). Het wordt echter aanbevolen het pessarium elke avond te verwijderen en 's ochtends opnieuw in te brengen.

Het product is uitsluitend bestemd voor **gebruik door één patiënte** en mag niet door andere patiënten worden

gebruikt. Voor elke inbreng dient het oppervlak van het pessarium te worden gecontroleerd. Bij beschadiging moet het hulpmiddel worden vervangen.

Het kubuspessarium moet worden ingebracht met **de knop gericht naar de uterus** en **de draad naar de vagina**. Reiniging kan gebeuren met stromend water, **zonder gebruik van desinfectiemiddelen**.

### **Beschikbare maten**

Het Dr. Arabin geperforeerde kubuspessarium met knop is verkrijgbaar in de volgende maten:

Maat 0 (25 mm), Maat 1 (29 mm), Maat 2 (32 mm), Maat 3 (37 mm), Maat 4 (41 mm), Maat 5 (45 mm), Maat 6 (55 mm), Maat 7 (65 mm), Maat 8 (70 mm), Maat 9 (75 mm).

Pessarium maat: Maat 0 - 25 mm, Maat 1 - 29 mm, Maat 2 - 32 mm, Maat 3 - 37 mm, Maat 4 - 41 mm, Maat 5 - 45 mm, Maat 6 - 55 mm, Maat 7 - 65 mm, Maat 8 - 70 mm, Maat 9 - 75 mm

Referentie ARWPLKX