

COMPENSATIEFILTER "BOEMERANG"

De eerste compenserende filter die bij patiënten wordt gebruikt



Productomschrijving:

Vermijd overbelichting van subtiele perifere laesies. Ondoorzichtige keten opgenomen in de periferie, altijd voorbij de huid. Hecht verticaal met zeer weinig druk. Bestand tegen alcohol, Zephiran® en hitte.

Toepassingen:

Schouder (beeld 3)

Onderste bovenkaak (beeld 4): het anterieure deel wordt niet te sterk gepenetreerd.

T-1 tot t-3 (beeld 5): bij patiënten met een prominente onderborst worden deze overbelichte wervels beschermd door de omgekeerde boemerang.

Cefalometrie (beeld 6): geen bariümlaagje meer op de huid. Plaats gewoon het dikste deel van de boomerang ten opzichte van de landmarks op het oppervlak. Als het stof met water wordt weggespoeld, zal het met zeer weinig druk verticaal blijven staan.

Patella (beeld 7): het onderste voorste deel is beschermd. Maar voor knieën in strekking zijn het boomerang 15° model of de klein prisma te verkiezen.

Oppervlakkig botletsel (beeld 8): niet overbelicht door tomografie.

Specificaties

- IMFI-01 - Boemerang: L29 x B19 x H4,5 cm ca.; 1 kg
- IMFI-01A - Bommerang - Met ingebouwd klittenband: L23 x B33 x H5 cm ca.; 1,2 kg

- IMFI-01NC - Boemerang - Kettingloos: L23 x B33 x H5 cm ca.; 1 kg
- IMFI-06 - Boemerang 15°: L21 x B7 x H3,3 cm ca. ; 600 g

Model: IMFI-01, IMFI-01A, IMFI-01NC, IMFI-06

Referentie -